

ЗАЛИВКА СЛЕПКА

После завершения дезинфекции тщательно вымойте и высушите слепок перед заливкой гипса. Рекомендуется заливать слепок немедленно (в течение 15-30 минут), используя гипсы 3-го класса (например, гипсы «Elite Model»/«Model Fast» от компании «Zhermack») или гипсы 4-го класса (например, гипс «Elite Rock» от компании «Zhermack») (рис. 12), следуя инструкциям производителя.

СОХРАНЕНИЕ СЛЕПКА

Если гипс нельзя залить немедленно, удалите излишки воды и храните слепок при комнатной температуре (23°C/73°F) в герметичном полиэтиленовом пакете. В этих условиях заливка гипса может быть отсрочена вплоть до 5 дней с момента снятия слепка (рис. 13).

СКАНИРОВАНИЕ ЗУБНОГО СЛЕПКА

Hydrogum 5 (Гидрогам 5) поддается сканированию с использованием следующих технологий: структурированный свет, синий структурированный свет, синий лазер и СВСТ (конусно-лучевая компьютерная томография).

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Информация, предоставленная любым способом, даже во время демонстраций, не делает недействительными Инструкции по использованию. Пользователи должны убедиться в том, что материал подходит для предполагаемого применения. Производитель не может нести ответственность за ущерб, в том числе перед третьими лицами, вызванный несоблюдением инструкций или непригодностью материала для использования. Ответственность производителя в любом случае ограничена стоимостью поставляемой продукции. Сообщайте о любых серьезных инцидентах, связанных с медицинским средством, производителю и соответствующим органам.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Температура: от -15 до +40 °C
Влажность: не более 75%
Транспортирование в таких условиях не более 30 дней.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Комнатная температура: (23 ± 1) °C,
Относительная влажность: (50 ± 10) %,
Температура воды: (23,0 ± 0,1) °C,
Температура порошка: (23,0 ± 0,5) °C

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ООО «Дентсплай Сирона»
115035, г. Москва, наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3Н
Тел.: +7 (495) 725 10 87

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

По категории опасности СанПиН 2.1.7.2790-10:

Неиспользованные продукты имеют класс А - эпидемиологически безопасные отходы, сходные по составу с твердыми бытовыми отходами.

Использованные продукты имеют класс Б - эпидемиологически опасные отходы.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА / ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия распространяется на материальные или производственные дефекты, обнаруженные при нормальных условиях использования продукта, с даты поставки до даты истечения срока годности, указанной на упаковке.

**Дополнительная информация указана в Приложении 1, доступном по запросу покупателя.

Zhermack
Dental

альгинаты

Альгинаты для зубных слепков



hydrogum 5
hydrocolor 5

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАБОР МЕРНИКОВ* ТОЛЬКО для Hydrogum 5 (Гидрогам 5) и Hydrocolor 5 (Гидроколор 5)!

*Если он не предоставлен, спросите у Вашего торгового представителя, как его получить.

Инструкция по применению

Материал стоматологический слепочный альгинатный с принадлежностями, варианты исполнения:**

Материал стоматологический слепочный альгинатный HYDROGUM 5
Материал стоматологический слепочный альгинатный HYDROCOLOR 5

ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Альгинат для зубных слепков

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ*

Hydrogum 5 (Гидрогам 5): альгинат с длительной стабильностью размеров и высоким уровнем воспроизведения деталей. Отдушка: Мангостан.

Hydrocolor 5 (Гидроколор 5): хроматический альгинат с длительной стабильностью размеров. Изменение цвета сопровождается различными стадиями обработки: розовый - при смешивании, фиолетовый - при работе с материалом и расположении на слепочной ложке, светло-синий - при нахождении в полости рта до момента отверждения. Отдушка: ягоды

* Эта информация относится к линейке альгинатов компании «Zhermack».

УПАКОВКА

Пакет 453 г. Также доступны однодозовые пакеты 21 г.

СОСТАВ

Hydrogum 5 (Гидрогам 5): диатомитовая земля, сульфат кальция, альгинат калия, пирофосфат натрия, флуотитанат калия, гидроксид магния, вазелиновое масло, пищевые ароматизаторы (мангостан), пигменты.

Hydrocolor 5 (Гидроколор 5): диатомитовая земля, альгинат натрия, сульфат кальция, фосфат натрия, флуотитанат калия, гидроксид магния, вазелиновое масло, pH индикатор (фенолфталеин), пищевые ароматизаторы (земляника и мята), пигмент.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Для использования профессионалами в области стоматологии с целью снятия слепков зубов у пациентов.

ПРЕТВОПОКАЗАНИЯ

Не используйте на пациентах, имеющих известную гиперчувствительность в отношении любого из компонентов. Для получения дополнительной информации об аллергенах, содержащихся в ароматизаторах, свяжитесь с компанией «Zhermack».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Альгинат содержит вдыхаемый кристаллический кремнезем. Избегайте продолжительного воздействия на глаза. Избегайте продолжительного вдыхания. Не проглатывайте. Щадятельно смешивайте воду и порошок, но избегайте на удалении от пациента, чтобы свести к минимуму риск вдыхания порошка и количество летучих частиц для подверженных воздействию людей. Продукция является безопасной для использования при неповрежденных слизистых оболочках.

Попадание в глаза: В случае попадания в глаза промойте их обильным количеством воды в течение 15 минут. Если раздражение сохраняется, обратитесь к врачу.

При вдыхании: В случае вдыхания переместите пациента на открытый воздух. Выпейте воды, чтобы очистить горло, и высморкайтесь, чтобы удалить материал. Если раздражение или боль сохраняется, обратитесь к врачу.

При проглатывании: Не проглатывайте. При случайном проглатывании выпейте обильное количество воды.

Если мерная ложка «Zhermack» недоступна, дозируйте препарат по весу или узнайте у торгового представителя, как ее можно приобрести.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Операторы, которые используют продукцию, должны носить средства защиты глаз, фильтрующую лицевую маску, подходящую для работы с порошками (FFP2 или FFP3), перчатки и соответствующую одежду.

Для обеспечения лучшей адгезии материала к слепочной ложке рекомендуется использовать слепочные ложки с удерживающими краями. Рекомендуется накладывать в слепочную ложку подходящее количество материала, чтобы не перекрывать дыхательные пути.

Избегайте работы со множеством слепков за один сеанс (более чем шесть в одной и той же луже/области) для предотвращения раздражения слизистых оболочек в ротовой полости. При наличии симптомов немедленно прекратите использование материала. Если раздражение сохраняется, обратитесь к врачу.

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ

	Медицинское изделие
	Номер по каталогу
	Номер партии
	Использовать до
	Температурный диапазон
	Осторожно
	Обратитесь к инструкции по применению
	Изготовитель
	Используйте перчатки и рабочую одежду
	Используйте фильтрующую маску, подходящую для работы с порошками (FFP2 или FFP3)
	Используйте защитные очки
	срок годности 3 года
	срок годности 5 лет

Zhermack S.p.A.

Виа Бовадзеккино, 100 | 45021 Бадия-Полезине (Ровино) Италия

Тел.: +39 0425 597611 | Факс: +39 0425 53596 | info@zhermack.com | www.zhermack.com

CE 0123

Сроки клинического использования (показаны в таблице 1) предполагаются отсчитывать от начала смешивания с деионизированной водой при 23°C/73°F. Температура и жесткость воды могут повлиять на сроки клинического использования материала. Холодная вода замедляет отверждение; горячая вода ускоряет его.

Не загрязняйте материал или зубы/поверхности не полимеризованными акриловыми пласт-массами или бис-акриловым поверхностным слоем. Остатки этих материалов могут воспрепят-ствовать желированию продукции. Если поверхности загрязнены, рекомендуется очистить их этиловым спиртом или другими растворителями.

Используйте в хорошо проветриваемом помещении. Избегайте вдыхания рассеянного в воздухе порошка. См. Предупреждения.

Не распыляйте продукт (порошок альгината, желированный альгинат, слепок и упаковку) в окружающую среду и утилизируйте его в соответствии с местными регламентами.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

При наличии аллергии на любой из компонентов могут возникнуть раздражение, покраснение или признаки повышенной чувствительности.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Слепочный материал для воспроизведения зубной дуги, а также создания моделей в диагно-стических и лечебных целях.

ПОШАГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Предварительные операции:

1. Прочитайте инструкцию перед использованием.
2. **Используйте защитные очки, фильтрующую маску, подходящую для работы с порошками (FFP2 или FFP3), перчатки и рабочую одежду.**
3. Вскройте пакет (рис. 1) и пересыпьте альгинат в чистый, сухой и воздухопроницаемый контейнер (рис. 2). Сохраняйте номер серии и дату истечения срока годности, отрезанные от мешка. Если на контейнере имеется этикетка, не забывайте поменять ее на наименование, серию и дату истечения срока годности, отрезанные от пакета.

Подготовка материала:

4. Выберите слепочную ложку, размер которой подходит под размер полости рта. Используйте фиолетовые мерные ложки.
5. Встряхните контейнер 2 или 3 раза, чтобы помочь дисперсированию порошка (рис. 3).
6. Произведите дозирование. Возьмите альгинат мерной ложкой, не надавливая на порошок, разровняйте сверху или уберите избыток альгината, используя плоскую часть лопаточки. (рис. 4)
7. Высыпьте отмеренный альгинат в резиновую чашку для смешивания. Повторяйте операцию, пока не получите желаемое количество.
8. Закройте контейнер по окончании дозирования (рис. 5).
9. Добавьте в порошок воду. Налейте 1/3 мерного стаканчика воды (15 мл) на каждую ложку порошка (7 г). Пример: На две меры порошка (14 г), достаточные для средней верхней слепочной ложки, добавьте 2/3 мерного стаканчика воды (30 мл). (рис. 6). Следуйте предложенной таблице продолжительности смешивания (рис. 7).

Использование материала:

10. Поместите материал на слепочную ложку (рис. 8).
11. Поместите слепочную ложку в полость рта и держите до конца рабочего времени материала (рис. 9).

12. Подождите, пока материал не станет желеобразным, соблюдая время отверждения от нача-ла смешивания, а затем удалите слепок изо рта пациента.

13. Полосните пациента прополоскайте рот водой. Осмотрите рот пациента, чтобы убедиться в отсутствии остатков альгината.

Дезинфекция слепка:

14. После снятия слепка тщательно ополосните его, чтобы удалить любые остатки и следы слю-ны (рис. 10). Удалите избыток воды и немедленно продезинфицируйте.

15. Дезинфекция достигается при использовании специального дезинфицирующего средства для альгинатов. Погрузите слепок в дезинфицирующее средство или распылите это средство непосредственно на слепок (если Вы используете распыляемое дезинфицирующее средство) (рис. 11). Соблюдайте инструкции производителя выбранного дезинфицирующего сред-ства во времени контакта с ним. Были испытаны дезинфектанты на основе четвертичных аммониевых соединений или смеси спирта с веществами, снижающими поверхностное натяжение. Ознакомьтесь с инструкциями по применению каждого конкретного дезинфи-цирующего средства, которое вы хотите использовать, чтобы убедиться в их совместимости и эффективности.

В случае механического или автоматического смешивания следуйте инструкциям произво-дителя устройства для смешивания.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КЛИНИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Продолжительность клинического использования указана в **Таблице 1**.

Линия I: Продолжительность перемешивания

Линия II: Рабочее время – включая время на перемешивание

Линия III: Время нахождения в полости рта

Линия IV: Время свхватывания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Технические данные в соответствии с ISO 21563 приведены в **Таблице 2**.

Линия I: Упругое восстановление %

Линия II: Предел прочности на разрыв Н/мм

Линия III: Деформация при сжатии %

Линия IV: Время начального отверждения

ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Обязательно дезинфицируйте и, по возможности, стерилизуйте все используемые вместе с альгинатом инструменты, до и после их использования. Следуйте предупреждениям относитель-но совместимости материалов а также технического обслуживания и ремонта, представ-ленным производителем инструментов. Соблюдайте инструкции производителя выбранного дезинфицирующего средства во времени контакта с ним. Ознакомьтесь с инструкциями по применению каждого конкретного дезинфицирующего средства, которое вы хотите использовать, чтобы убедиться в их совместимости и эффективности.

ХРАНЕНИЕ

Дата истечения срока годности относится к невскрытой и надлежащим образом хранившейся упаковке. Предлагается хранить продукцию в воздухопроницаемом контейнере вплоть до трех месяцев. Закройте контейнер в конце дозирования и храните его при температуре от 5 до 27°C/41-80°F.

Продолжительность клинического использования (1)

Продолжительность клинического использования	Hydrogum 5 (Гидрогам 5)	Hydrocolor 5 (Гидроколор 5)
1 Продолжительность перемешивания	30 сек	30 сек
2 Рабочее время	1 мин. 15 сек.	1 мин. 10 сек.
3 Время нахождения во рту	1 мин. 0 сек.	1 мин. 0 сек.
4 Время схватывания	2 мин. 15 сек.	2 мин. 10 сек.

Техническая информация

Техническая информация ISO 21563	Hydrogum 5 (Гидрогам 5)	Hydrocolor 5 (Гидроколор 5)
1 Упругое восстановление (%)	97,0	97,0
2 Предел прочности на разрыв (Н / мм)	0,75	0,70
3 Деформация при сжатии (%)	13,0	14,0
4 Время начального отверждения (при 23°C/73°F)	2 мин. 20 сек.	2 мин. 15 сек.



Вода 23°C